

BEDIENUNGSANLEITUNG

Rollz Flex

DE

Deutsch

Rollz® International BV – Rollz Flex

© Copyright 2021 Rollz® International BV

In dieser Gebrauchsanleitung erklärt und erläutert Rollz International die sichere Nutzung und Wartung des Rollz Flex so gut wie möglich. Das gekaufte Produkt kann geringfügig von dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkt abweichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie können die aktuelle Gebrauchsanleitung von Rollz International BV anfordern oder von www.rollz.de herunterladen.

Rollz International BV kann für technische Fehler oder Mängel nicht haftbar gemacht werden.

CE-Konformität

Der Rollz Flex erfüllt die Anforderungen der VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 5. April 2017 über Medizinprodukte. Auf der Grundlage der Klassifizierungsregeln in Anhang IX dieser Richtlinie wird der Rollz Flex in die Klasse I eingestuft.

Die Konformitätserklärung wurde in Eigenverantwortung von Rollz International BV auf der Grundlage des Anhangs VII dieser Richtlinie ausgestellt.

UKCA-Konformität

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der britischen Verordnung über Medizinprodukte von 2002 (UK Medical Devices Regulations 2002). Basierend auf den Klassifizierungsregeln in Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG, wie in der UK MDR 2002 referenziert, wird das Produkt als Klasse I eingestuft. Die Konformitätserklärung wurde unter der alleinigen Verantwortung von Rollz® International BV gemäß Anhang VII der Richtlinie 93/42/EWG, wie in der UK MDR 2002 referenziert, erstellt.

Zertifizierter Rollator

Im Rollator-Modus ist der Rollz Flex ein voll zertifizierter Rollator, der vom Prüf- und Produktzertifizierungsinstitut SGS nach ISO 11199-2 geprüft und zugelassen wurde.

INHALT

Bevor Sie beginnen	70
Wichtige Informationen	70
Sicherer Umgang mit dem Rollz Flex	71
Warnungen	76
Hinweis zur Verwendung des Rollz Flex	76
Bedingungen, wenn das Rollz Flex nicht geeignet ist	76
Technische Spezifikationen	77
Überprüfen Sie, ob Ihre Lieferung vollständig ist	77
Wiederverwendung	77
Inbetriebnahme	77
Einstellung der Bremse	79
 Verschiedene Versionen	 79
Rollz Flex mit klassischen Bremsen	79
Rollz Flex mit Kippbremsen	80
Rollz Flex Small mit klassischen Bremsen	80
Rollz Flex in Rollatorposition gesichert	80
 Garantie	 81
Was bedeutet die Herstellergarantie?	81
Was ist nicht von der Herstellergarantie abgedeckt?	82
Einreichen eines Garantieanspruchs	83
Reparatur nach Ablauf der Garantiezeit	83
Kontakt mit Rollz	83
 Anweisungszeichnungen	 84
Falten des Rollz Flex	84
Entfalten des Rollz Flex	85
Auf dem Rollz Flex Sitz sitzen (zuerst die Handbremse anziehen!)	86
Schwellen und Bordsteine	86
Verwenden der Tasche	87
Den Innenbeutel entfernen	87

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Rollz Flex. Mit dieser Gebrauchsanleitung möchte Rollz Ihnen helfen, den Rollz Flex sicher und optimal zu nutzen. Bitte registrieren Sie Ihren Einkauf auf www.rollz.de.

Wichtige Informationen

-


70

- Verwenden Sie nur Original-Zubehör von Rollz.
- Lagern Sie den Rollz Flex nur trocken im Innenbereich.
- Teile des Rollz Flex können sich bei Sonneneinstrahlung leicht verfärben oder verblassen.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
- Verwenden Sie nur Originalteile, die von Rollz International BV zum Austausch von Teilen oder zur Reparatur freigegeben wurden.
- Die Garantie erlischt, wenn das Produkt durch unsachgemäße Handhabung wie Überladen, falsches Falten oder Entfalten, die Verwendung von Teilen die nicht von Rollz zugelassen sind, oder die Verwendung von nicht originalen Zubehöerteilen beschädigt wird. Die Garantiebedingungen sind in Kapitel Garantie dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Sie finden die Seriennummer und Artikelnummer auf dem Produktaufkleber Ihres Rollz Flex. Dieser befindet sich auf der Rückseite des rechten Scharnierrohrs.
- Der Rollz Flex ist patentiert und der Markenname und das Modell sind geschützt.


Sicherer Umgang mit dem Rollz Flex

- Der Rollz Flex wurde entwickelt um beim Gehen im Freien und in Innenräumen Unterstützung zu bieten.
- Gehen Sie so nah wie möglich zum Rollz Flex, um die richtige Unterstützung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Der Rollz Flex bietet die größte Unterstützung wenn der Schiebegriff ganz nach vorne weg von Ihnen positioniert ist. Das ist der Rollator-Modus. In dieser Position können Sie sich mit vollem Gewicht auf dem Schiebegriff lehnen **(Abbildung 2)**.
- Verwenden Sie den Rollz Flex nur dann als Rollator, wenn der Schiebegriff vollständig nach vorne steht. Das ist die Position der Rollator-Modus. Sie finden die Einstellmöglichkeiten in **(Abbildung 3)**.
- Ist der Schiebegriff in der Shopper-position (nach oben) oder in der Kippposition (ganz zu Ihnen gerichtet) positioniert? Verwenden Sie den Rollz Flex in diesem Fall nicht als Rollator. Im Shopper-Modus bietet der Rollz Flex nur eine geringe Unterstützung.
- Positionieren Sie Ihre Hände immer in der Mitte der Gummigriffe. Sie können die korrekte Position an den Nuten an den Griffen erkennen **(Abbildung 4)**.


**Abbildung 2: Positionen
des Lenkers**

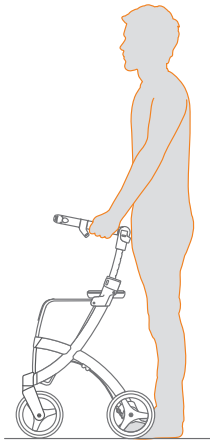


**Rollator Position – maximale
Unterstützung**

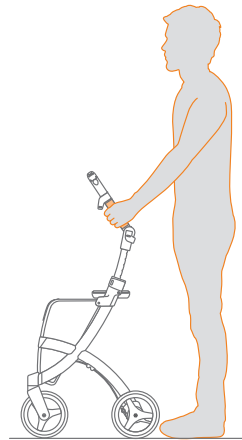

**Semi-Rollator Position –
starke Unterstützung**

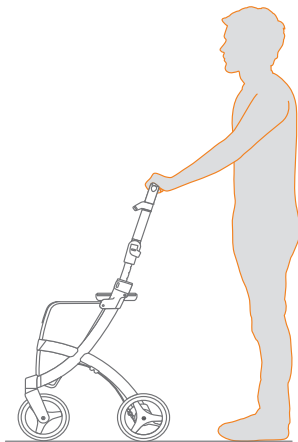

**Shopper Position –
leichte**

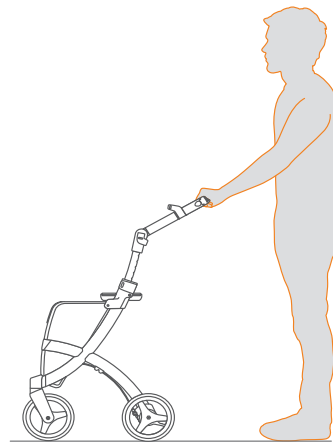

**Kipp Position – keine
Unterstützung**

Abbildung 3: Position des Schiebegriffs einstellenposition



Vorsicht

Drücken Sie oben auf den Hebel, um ein Einklemmen der Finger zu vermeiden.






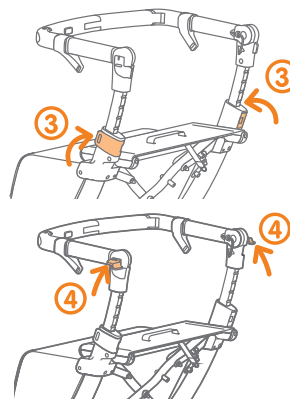


Abbildung 4:
Richtige Haltung der Hände

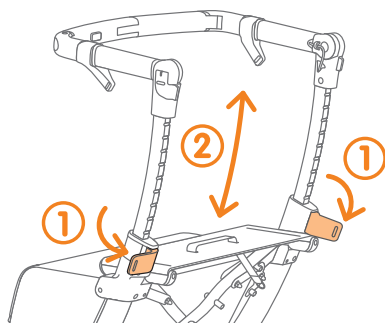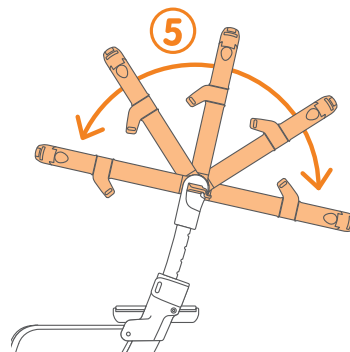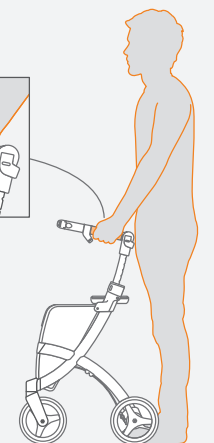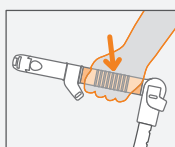




Vorsicht

Drücken Sie oben auf den Hebel, um ein Einklemmen der Finger zu vermeiden.

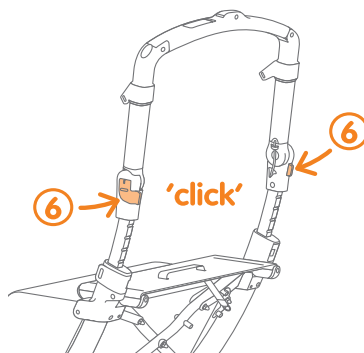


- Wenn Sie den Rollz Flex nicht verwenden, verwenden Sie immer die Feststellbremsen auf beiden Seiten.
- Überprüfen Sie immer die Bremsen vor dem Gebrauch. Wenn die Bremsen nicht richtig funktionieren, lassen Sie die Bremsen neu einstellen, z.B. von Ihrem Lieferanten, um den Verlust von Bremsen und unsicheren Situationen zu verhindern.
- Die Bremsen können etwas gequetscht werden, um die Geschwindigkeit zu reduzieren, können jedoch nicht kontinuierlich während des Gehens bremsen.
- Möchten Sie auf dem Rollz Flex Sitz sitzen? Stellen Sie sicher, dass beide Bremsen an der Feststellbremse sind, sowohl beim Hinsetzen als auch beim Aufstehen (**Abbildung 5 und Abbildung 6**).

Abbildung 5:
Verwenden der
klassischen
Bremsen

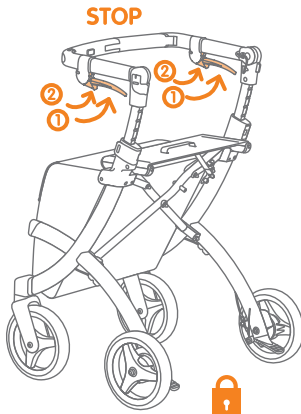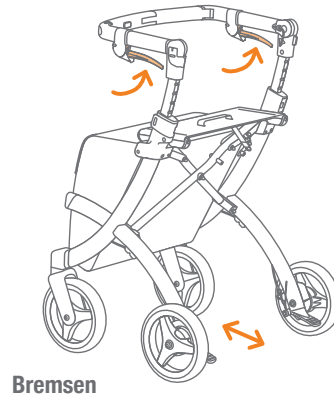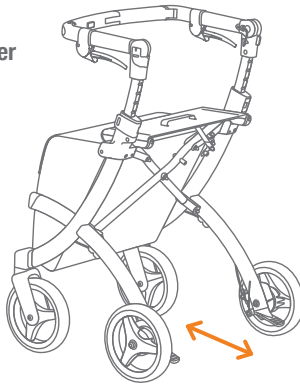


Verwenden der Feststellbremsen

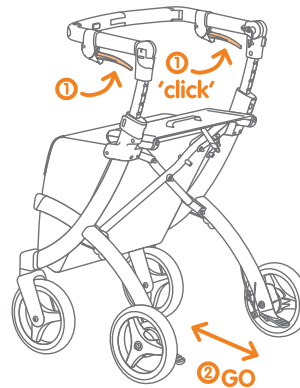


Lösen der Feststellbremsen

Abbildung 6:
Verwenden der
Kippbremsen
brakes

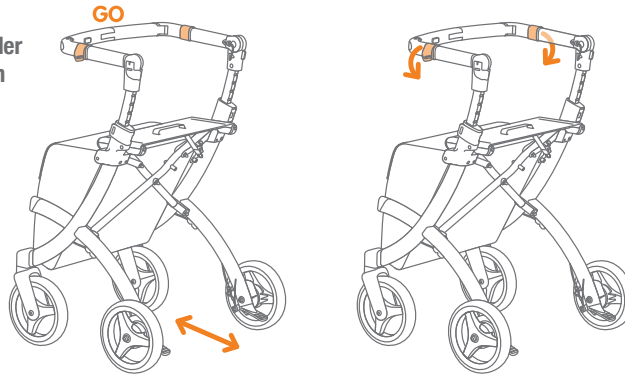

**Verwenden
und lösen der
Bremsen**

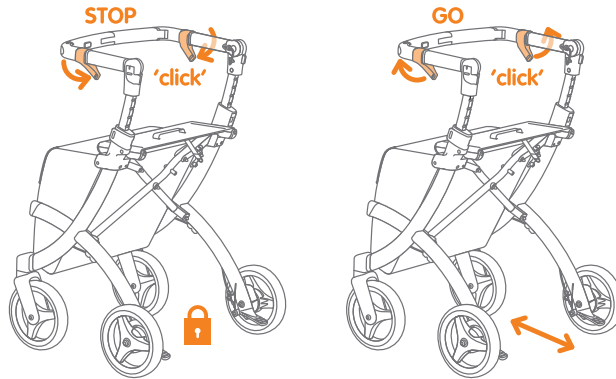

- Sie können nur dann sicher auf dem Rollz Flex sitzen, wenn Ihre Füße im Sitzen auf dem Boden liegen können.
- Möchten Sie den Rollz Flex anheben, um ihn beispielsweise im Auto oder anderswo zu verstauen? Wenn sich Gegenstände in der Tasche befinden, nehmen Sie zuerst die innere Tasche mit ihrem Inhalt aus dem Rollz Flex. Dann den Rollz Flex einklappen. Heben Sie das Produkt am Metallrahmen an, nicht am Schiebegriff.
- Fahren Sie nicht über extrem holpriges und unebenes Gelände mit Löchern im Straßenbelag. In diesem Fall laufen Sie Gefahr umzufallen.
- Der Rollz Flex ist eine Gehhilfe und ein Gehwagen für nur eine Person, es ist kein Rollstuhl und kann nicht als Rollstuhl benutzt werden.
- Der Rollz Flex ist kein Buggy oder Kinderwagen und nicht zum Tragen oder Transportieren von Kindern bestimmt.



Warnungen

- Achten Sie beim Falten und Entfalten des Rollz Flex darauf, dass Ihre Finger nicht eingeklemmt werden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Klammern/Verriegelungen für den Gebrauch gesperrt sind.
- Reisen Sie, und hat der Flugbegleiter, Spediteur oder Fahrer Ihren Rollator zum Beispiel im Laderaum des Flugzeugs oder im Frachtraum eines Reisebusses oder hinter in einem Taxi abgelegt? Dann überprüfen Sie Ihren Rollator auf mögliche Schäden.
- Der Rollz Flex wurde entwickelt, um die verschiedenen Funktionen mit Leichtigkeit zu bedienen. Es ist jedoch wichtig, regelmäßig zu überprüfen, ob der Benutzer in der Lage ist, alle Operationen unabhängig auszuführen oder ob der Benutzer Unterstützung oder Hilfe von anderen Personen benötigt.
- Halten Sie den Rollz Flex von offenen Flammen und anderen Wärmequellen wie Elektro- oder Gasheizgeräten fern.
- Die Reinigung mit einem Desinfektionsmittel sollte autorisierten Personen überlassen werden.
- Verwenden Sie den Rollz Flex nicht, wenn ein Teil gebrochen, zerrissen, defekt oder unvollständig ist oder wenn Teile fehlen.

Hinweis zur Verwendung des Rollz Flex

Der Rollz Flex ist eine Mobilitätsgerät für den Einsatz als Rollator (nur in der Rollatorposition) und als Einkaufswagen. Im Rollatorposition bietet der Rollz Flex Unterstützung für gehbehinderte Personen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Hauses. Der Sitz kann für eine kurze Zeit benutzt werden.

Wenn Sie weniger Unterstützung benötigen, können Sie die Rollz Flex-Schiebegriff nach Ihren aktuellen Bedürfnissen neigen; beliebig nach oben im Shopperposition oder nach Ihnen gerichtet im Kipp-position (**Abbildung 2 und Abbildung 3**). In der fixierten Version kann dies nur mit einem Inbusschlüssel eingestellt werden

Bedingungen, wenn der Rollz Flex nicht geeignet ist

Der Rollz Flex ist nicht geeignet für:

- Menschen mit Sehstörungen;
- Personen mit starken Gleichgewichtsstörungen, die den Rollz Flex nicht selbstständig bedienen können;
- Personen mit einem Körpergewicht über 125 kg.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN		
	Rollz Flex	Rollz Flex Small
Rollator Gewicht	7,7 kg	6,8 kg
Körpergröße	1,55-1,95m	1,40-1,60m
Sitzhöhe	62 cm	52,5 cm
Sitzbreite	44 cm	44 cm
Maximale Belastung	125 kg	125 kg
Gesamtbreite	62,3 cm	62,3 cm
Gesamtlänge	60 cm	60 cm
Breite gefaltet	33 cm	33 cm
Griffhöhenbereich	80-100 cm	70-81 cm
Maximale Tasche Inhalt	25 litre/20 kg	14 liter/20 kg
Durchmesser Räder	8 inch	8 inch

Überprüfung ob die Lieferung vollständig ist

Der Rollz Flex wird gebrauchsfertig geliefert, bitte überprüfen Sie bitte, ob alles geliefert ist. Der Rollz Flex wird komplett geliefert mit:

- 1 Innenbeutel
- 1 Anleitung.



WARNUNG!

Halten Sie Kunststoffverpackungen von Kindern fern, wegen der Gefahr des Erstickens. Kinder können dies in den Mund nehmen oder über den Kopf ziehen und ersticken. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.

Wiederverwendung

- Der Rollz Flex ist zur Wiederverwendung geeignet.
- Geben Sie dieses Rollz Flex Gebrauchsanleitung weiter zur sicheren Wiederverwendung an den neuen Benutzer.
- Bevor Sie den Rollz Flex an eine andere Person weitergeben, muss den Rollator zuerst von autorisierten Personen gereinigt und technisch überprüft und desinfiziert werden.

Inbetriebnahme

Der Rollz Flex wird komplett und einsatzbereit geliefert. Der Rollz Flex sollte jedoch an Ihre persönlichen Vorlieben und Körpergrößen angepasst werden.


Stellen Sie den Schiebegriff in die richtige Position (**Abbildung 2**) und in der für Sie geeigneten Höhe (**Abbildung 3**) siehe Abbildung Höhe des Schiebegriffs einstellen auf Ihre Größe. Stellen Sie wenn nötig die Bremsen ein.

NOTE


Die Einkaufstasche besteht aus einer Mischung aus PVC (70%) und Polyester (30%). Der Rollz Flex 2 ist mit weichen Reifen, aus PU-Schaum, ausgestattet.

Stellen Sie den Lenker auf die Höhe des Benutzers ein (**Abbildung 7**).

Abbildung 7: Höhe des Schiebegriffs einstellen

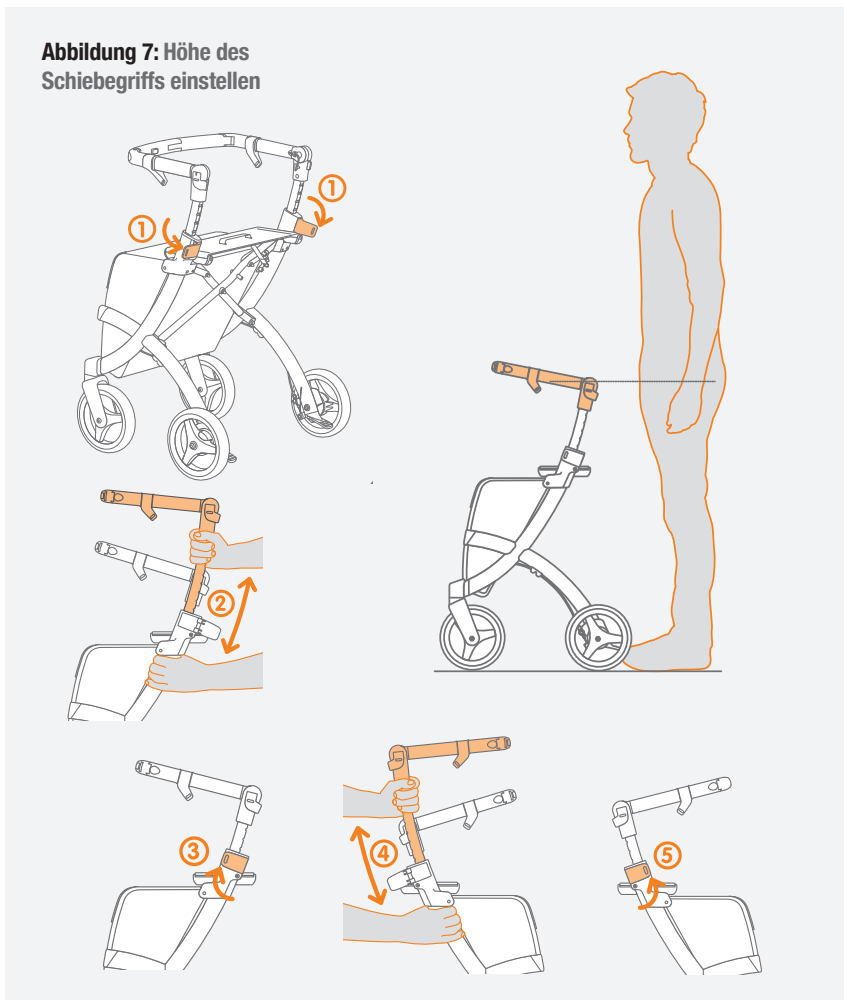

Einstellung der Bremse

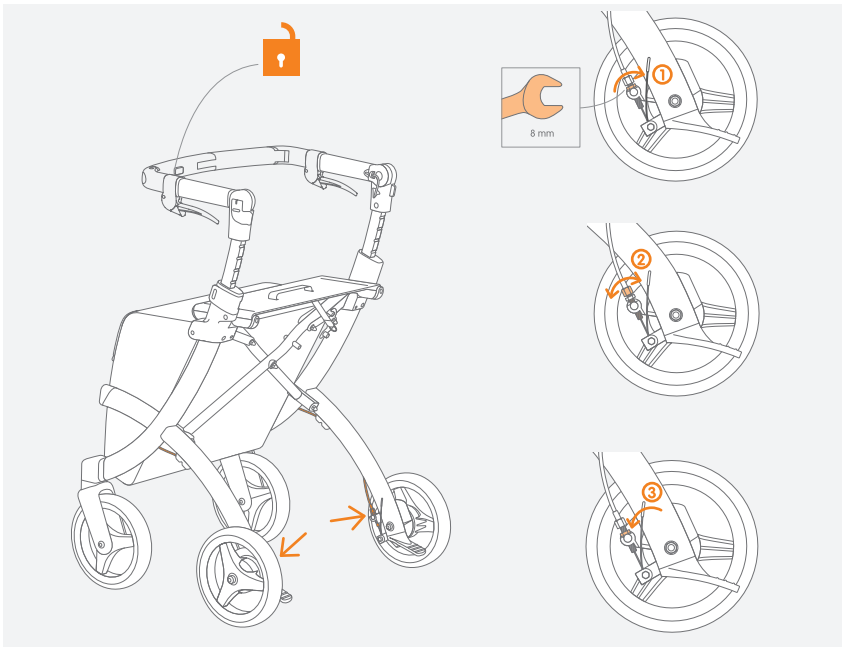

VERSCHIEDENE VERSIONEN

Der Rollz Flex ist in vier verschiedenen Versionen erhältlich. Diese Gebrauchsanleitung gilt für all diese Versionen.

Für den Rollz Flex gibt es verschiedene Zubehörteile wie einen Gehstockhalter und Taschenhaken für zusätzliche Taschen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rollz.de oder fragen Sie Ihren Lieferanten.

Rollz Flex mit klassischen Bremsen

Der Rollz Flex ist standardmäßig mit klassischen Bremsen erhältlich (**Abbildung 8**). Diese Version ist für Personen gedacht, die ihre Bremsen häufig beim Gehen benutzen. Diese klassischen Bremsen lassen sich am besten verwenden, wenn sich der Lenker in der Rollatorposition befindet. Auf diese Weise können Sie beim Gehen leicht bremsen, auch wenn Sie weniger Kraft in den Händen haben. Sie können die klassischen Bremsen auch als Feststellbremsen verwenden, z. B. wenn Sie sich hinsetzen möchten (**Abbildung 5**).

Rollz Flex mit Kippbremsen (Einstellung)

Diese Version (**Abbildung 9**) ist für Personen gedacht, die beim Bummel nicht viel bremsen. Diese Art der Kippbremse lässt den Schiebegriff stromlinienförmig aussehen. Mit den Kippbremsen können Sie in allen Positionen der Schiebegriff bremsen. Sie können Ihren Rollz Flex auch mit der Kippbremse auf die Feststellbremse setzen (**Abbildung 6**).

Rollz Flex Small mit klassischen Bremsen (verfügbar in begrenzte Länder)

Die Rollz Flex Small (**Abbildung 10**) ist für alle gedacht, denen der Standard Rollz Flex zu groß ist, mit einer Körperlänge von 1,40 m bis 1,60 m als Richtlinie. Es ist eine kleinere Version, nur mit klassischen Bremsen geliefert. Der Rahmen und die Sitzhöhe sind 10 cm niedriger als beim regulären Rollz Flex. Die maximale Belastung ist gleich: 125 kg.

Die Hauptunterschiede zum Standard Rollz Flex sind:

- Der Schiebegriff ist 10 cm tiefer in der untersten Position.
- Die Tasche ist kleiner, der Inhalt beträgt 14 Liter im Vergleich zu 25 Litern.

Rollz Flex und Rollz Flex Small, beide in Rollatorposition gesichert

Diese Versionen sind nur in den USA, Kanada und Japan verfügbar. Bei Lieferung ist der Schiebegriff dieses Rollz Flex im Rollatorposition gesichert fixiert (**Abbildung 11**). Diese fixierte Version ist mit klassischen Bremsen ausgestattet und sowohl in der Standard- als auch in der Kleinversion erhältlich.

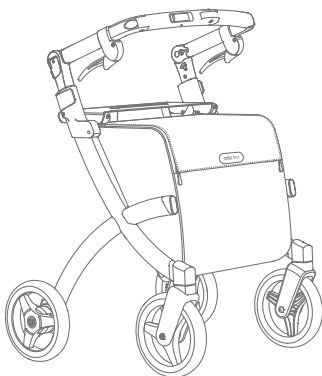


Abbildung 8: Rollz Flex mit klassischen Bremsen

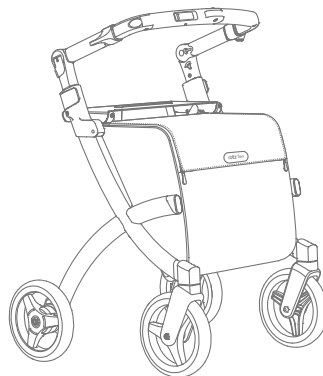


Abbildung 9: Rollz Flex mit Kippbremsen

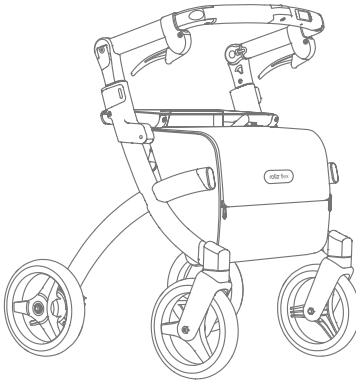


Abbildung 10: Rollz Flex Small mit klassischen Bremsen

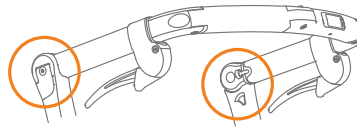


Abbildung 11: Rollz Flex in Rollatorposition gesichert

ROLLZ GARANTIE

Sie können Ihr Rollz-Produkt einfach registrieren indem Sie das Registrierungsformular auf www.rollz.de ausfüllen. Notieren Sie sich die Seriennummer des Rollz Flex, der sich hinten am rechten Scharnierrohr befindet.

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass etwas mit Ihrem Rollz Flex nicht stimmt, wenden Sie sich zuerst mit Ihrem Kaufbeleg an den Lieferanten, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben. In einigen Fällen ist Ihr Lieferant in der Lage, den Defekt selbst mit einer kleinen Reparatur zu beheben. In anderen Fällen wird sich Ihr Lieferant an den Rollz Verteiler in Ihrem Land wenden, um so bald wie möglich eine Lösung zu finden, die den folgenden Garantiebedingungen entspricht.

Was bedeutet die Herstellergarantie?

Als Hersteller gewährt Rollz International BV (im Folgenden "Rollz") eine Garantie für den von ihr hergestellten Rollz Flex (nachfolgend "das Produkt") unter folgenden Bedingungen:

1. Auf Material- und Konstruktionsfehler am Rahmen bei normaler Nutzung und Wartung gewährt Rollz 5 Jahre Garantie.
2. Für alle anderen Teile gilt eine allgemeine Gewährleistungsfrist von 24 Monaten, mit Ausnahme der normalen Gebrauchsabnutzung und Verschleiß.
3. Die Garantiezeit gilt ab Kaufdatum, wie auf dem Kaufbeleg angegeben.
4. Die Garantie gibt das Recht auf Reparatur, ausdrücklich nicht auf Austausch oder Rückgabe eines Produkts.

5. Die Garanzzeit verlängert sich nicht, auch nicht im Falle von Reparaturen.
6. Der Rollz Verteiler in Ihrem Land ist verantwortlich für den Transport zum und vom Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde ("der Lieferant"), auf eigenes Risiko verantwortlich, aber nur, wenn es sich um eine Reparatur handelt die von der Garantie abgedeckt ist. Die Versandart wird in Absprache mit dem Lieferanten festgelegt.
7. Die Garantie kann nur geltend gemacht werden, wenn Sie dem Rollz Verteiler in Ihrem Land zusammen mit dem fehlerhaften Produkt Rollz folgendes zur Verfügung stellen: den Kaufbeleg mit dem Kaufdatum und eine klare Beschreibung der Reklamationen.
8. Die Garantie ist nicht übertragbar und kann daher nur vom Erstbesitzer geltend gemacht werden.
9. Die Garantie hat keine Auswirkungen auf andere Rechte, die Ihnen gesetzlich zustehen.

Was ist nicht von der Herstellergarantie abgedeckt?

Die Herstellergarantie gilt nicht in den folgenden Situationen:

1. Wenn Sie Änderungen, Modifikationen oder Reparaturen selbst vorgenommen haben (oder wenn diese von Dritten durchgeführt wurden), ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Rollz-Verteilers in Ihrem Land oder des Lieferanten.
2. Falsche Montage oder Installation von Teilen Dritter, die für das Produkt nicht geeignet sind.
3. Wenn Defekte durch Vernachlässigung oder Unfall und/oder Gebrauch oder Wartung verursacht werden, die von den Anweisungen in der Bedienungsanleitung abweichen.
4. Unbeabsichtigte Beschädigung, abnormale Verwendung, falsche Lagerung oder unzureichende Pflege.
5. Wenn die Seriennummer beschädigt oder entfernt wurde.
6. Unzufriedenheit des Kunden mit dem Produkt in Bezug auf Abmessungen, Gewicht, Funktionalität, Farbe oder Design.
7. Schäden am Produkt durch normale Abnutzung.
8. Jede Verfärbung des Rahmens oder der Teile unter dem Einfluss direkter oder indirekter Sonneneinstrahlung.
9. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung entstanden sind.

- 10.** Kosten für den Versand des Rollators und/oder der Teile an den Rollz-Verteiler in Ihrem Land, wenn die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist.

Einreichen eines Garantieanspruchs

Bewahren Sie den Kaufbeleg auf und machen Sie eine Kopie für sich. Im Falle eines Defekts oder wenn Sie einen Anspruch geltend machen möchten, der von dieser Herstellergarantie abgedeckt ist, wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Lieferanten. Bei Bedarf wird Ihr Lieferant den Rollz-Verteiler in Ihrem Land kontaktieren. Wenn der Lieferant nicht mehr verfügbar ist, können Sie den Rollz-Verteiler in Ihrem Land bitten, Sie an den nächstgelegenen Lieferanten zu verweisen.

Reparatur nach Ablauf der Garantiezeit

Haben Sie Ihr Rollz Produkt seit mehr als zwei Jahren und müssen Sie das eine oder andere reparieren? Bitte kontaktieren Sie zuerst Ihren Lieferanten. Ihr Lieferant wird mit dem Rollz-Verteiler in Ihrem Land besprechen, was der beste Ansatz für Sie ist, damit Ihr Rollator so schnell wie möglich in einem optimalen Zustand ist. Sie werden im Voraus über die Reparaturkosten informiert.

Kontakt zu Rollz

Rollz International ist stets bestrebt, seine Produkte zu verbessern, und ist daher sehr an Ihrer Meinung interessiert. Bitte wenden Sie sich an Rollz International, wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare zur Verwendung der Produkte, zu diesem Handbuch oder zu anderen Themen haben.

Rollz® International bv

Rotterdamseweg 402M
2629HH Delft
Die Niederlande
+31 (0)20 362 20 10
info@rollz.com
www.rollz.nl

Rollz Mobility US Inc.



21950 Arnold Center Rd | Carson
California 90810
Vereinigte Staaten
+1 929 999 4178
info@rollz.com
www.rollz.com

Rollz Mobility UK Ltd (UKRP)

Ely, Cambridgeshire
CB7 9HE
Vereinigtes Königreich
+44 (0)333 207 2080
info@rollz.com
www.rollzmobility.co.uk



ANWEISUNGSZEICHNUNGEN

Falten

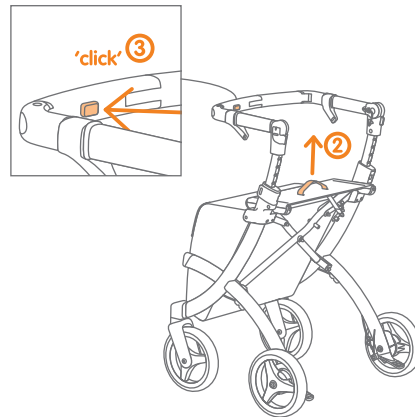
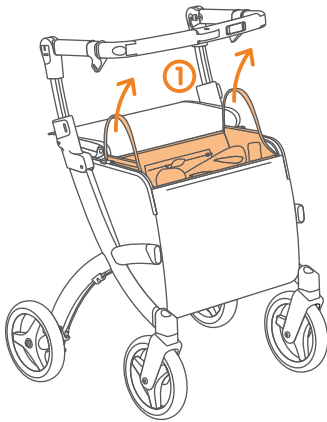


Vorsicht

Halten Sie die Hände vom Mittelteil fern, um ein Einklemmen der Finger zu vermeiden.

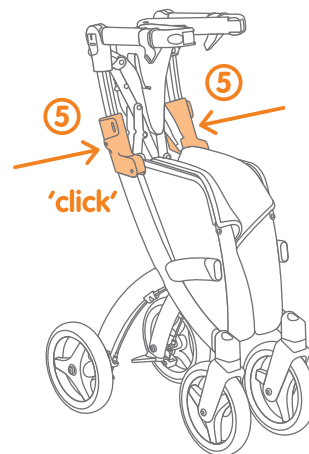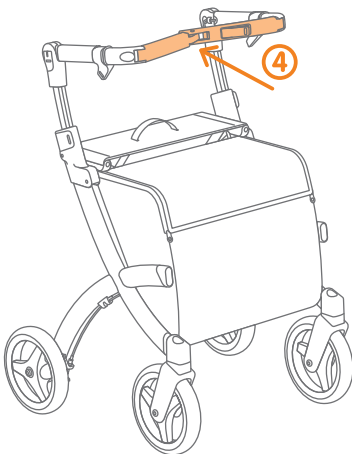

Entfalten

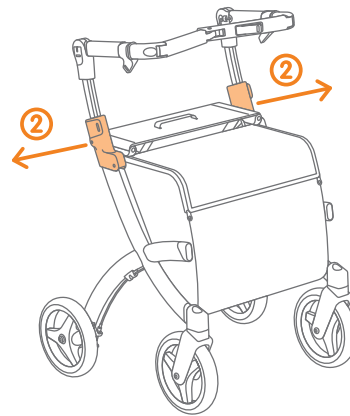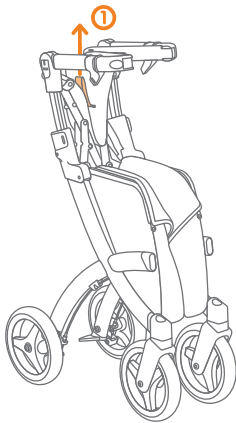


Vorsicht

Drücken Sie die Oberseite des Sitzes, um ein Einklemmen der Finger zu vermeiden.





Vorsicht


Drücken Sie oben auf den Hebel, um ein Einklemmen der Finger zu vermeiden.

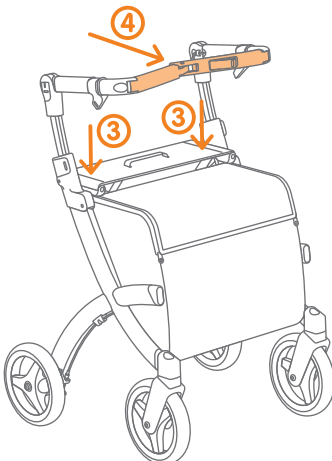



**Befor Sie
sich Auf dem
Rollz Flex
hinsetzen**

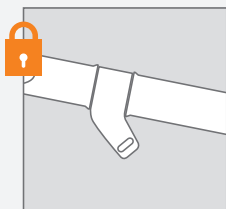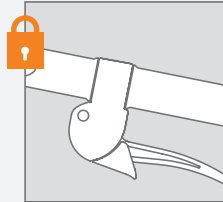


**Bitte verwenden Sie die
handbremse!**

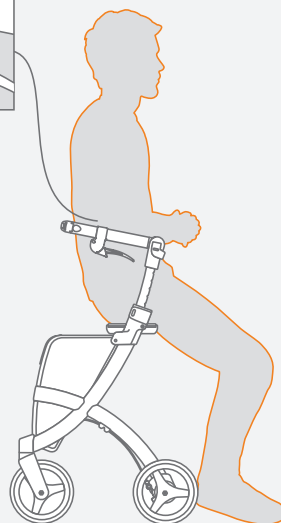

**Überqueren von
Schwellen und
Bordsteinen**

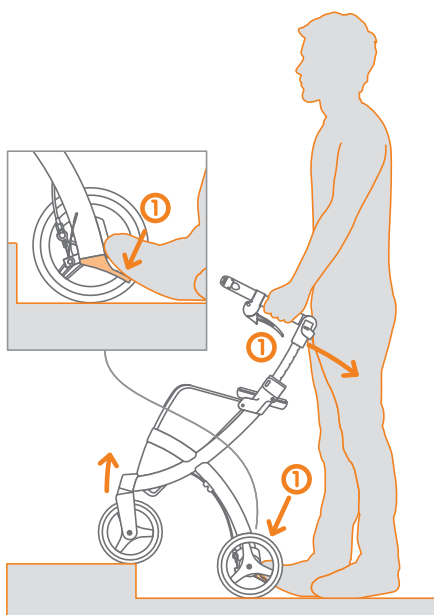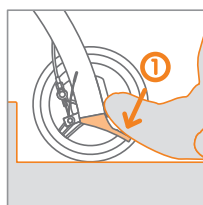

Verwenden der Tasche

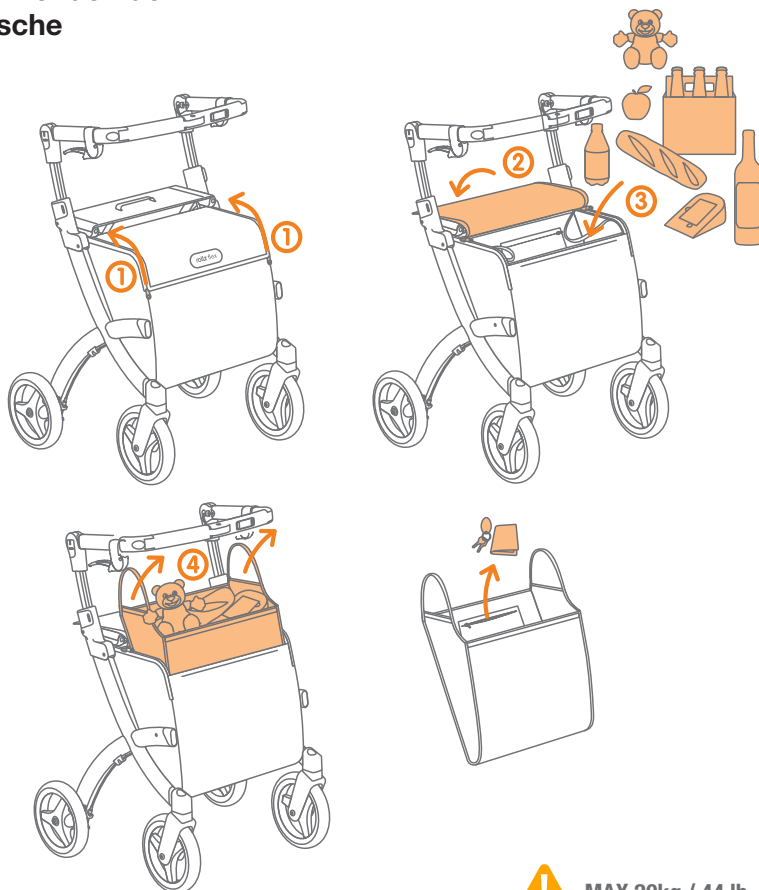

 MAX 20kg / 44 lb

Den Innenbeutel



rollz®



rollzint



RollzInternational



rollzint



RollzInternational

Version 2025.01